



1 Leg de kous met de **hiel naar boven** in het verlengde van de Dressbuddy® op tafel.

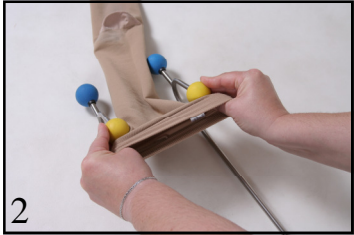


2 Zet de kous op de gele balletjes van de Dressbuddy®.

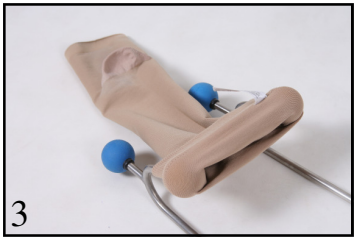

3 De kous zit met de bovenrand omgeslagen op de balletjes van de Dressbuddy®.



4 **Controle:** de kous dient zoals in de afbeelding aan de Dressbuddy® te hangen.

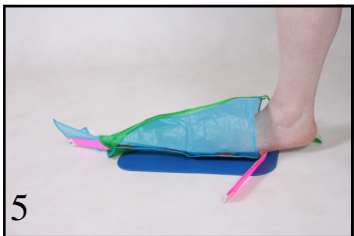

5 Leg de caran op de mat.




6 Steek uw voet in caran



7 Zorg dat de flap bij de tenen aan de bovenkant van de voet blijft liggen
Schuif de kous met de opening over de tenen.



8 Zet de Dressbuddy® op de mat en duw de voet verder in de kous tot voorbij de hiel (lukt dit niet probeer dan de **TIP**).

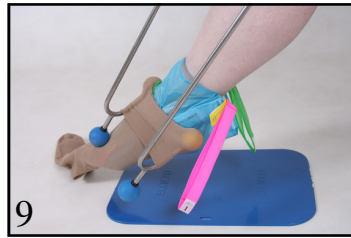

9 **TIP**
Til de voet op. Draai de Dressbuddy® een kwart slag en duw een balletje over de hiel en draai weer terug.



10 Trek de kous omhoog



11 Stop met trekken als de bovenkant van de kous ter hoogte van de kuit komt.



12 Duw de hiel van de kous op zijn plaats. Gebruik de stroefheid van de mat. Laat bij de tenen wat ruimte.



13 Haal nu met de hand de balletjes van de Dressbuddy® uit de kous.




14 Trek aan de 1. roze lus tot de klittenband los gaat. Dat is ongeveer 5 tot 10 cm.



15 Trek aan de 2. Groene slip aan de binnenkant van de kuit uit de kous. Wiebel met de tenen tijdens het er uit trekken.



16 Tijdens het trekken komt de kous iets mee omhoog en komt het teenstuk op zijn plaats.

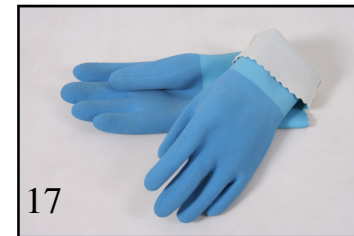

17 Verdeel, indien nodig de kous met behulp van de mat en de handschoenen.

Tip. Als de kous te ver mee omhoog komt zet dan de tenen op het antislip mat