



Zet de kous, met de hiel naar u toe, op de balletjes van de Dressbuddy®.



De kous zit met de bovenrand omgeslagen op de balletjes van de Dressbuddy®.



Controle: de kous dient zoals in de afbeelding aan de Dressbuddy® te hangen.



Vouw de slip dubbel



De losse flap wordt onder door de witte elastiek geschoven.



Controle: De slip dient te liggen zoals op de afbeelding.



Leg de slip over de kous in de Dressbuddy®



Schuif de voet met de tenen in de opening van de kous. .



Zorg bij het erin schuiven dat de rand van de slip niet meer als 5 cm over de tenen ligt



Duw de voet verder in de kous tot voorbij de hiel.




Stop met duwen als de kous de onderkant van de kuit bereikt.



Duw de hiel van de kous op zijn plaats. Gebruik de stroefheid van de mat.



Ga hier mee door tot uw kous goed zit.

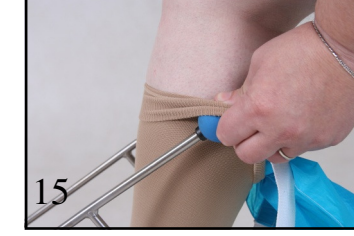

Haal nu met de hand de balletjes van de Dressbuddy® uit de kous.



Trek de slip aan de boven kant van u been aan de grijze lus



Trek de slip aan de boven kant van u been uit de kous en laat de voet op het matje rusten



Verdeel, indien nodig de kous met behulp van de mat en de handschoenen.