

# elliezo

Postadres:  
Postbus 17  
5170 AA Kaatsheuvel

Bezoekadres:  
Gasthuisstraat 122  
5171 GJ Kaatsheuvel

Tel.: 0416 - 283 571  
Email: info@elliezo.nl  
Fax: 084 - 756 88 70

www.elliezo.com

 **ERITEK BV**  
INTERNATIONAL

Alle hulpmiddelen kunnen op maat gemaakt worden.

Alle hulpmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Deze folder is voor uw leverancier gemaakt :



1  
Geschikt voor open en gesloten teen.  
Slip voet.




2  
Geschikt voor open en gesloten teen.  
Slip rond.



3  
Aan en uit trekken met 1 hulpmiddel.  
Slip open teen.



4  
Ook als u niet bij uw voeten kunt, is er het juiste hulpmiddel.  
DressBuddy® on/off.

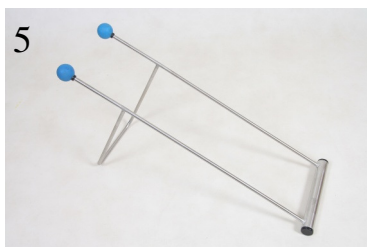

5  
Ook met weinig kracht in de handen kunt u uw TEK zelfstandig aan en uit doen. Been of arm kous.  
DressBuddy® staand.



6  
Lukt het met ander hulpmiddelen niet om uw TEK uit te trekken. Dan is het voor de Ort-O-Mate geen probleem.

## ARBO



Aan-uittrekken van:  
beenkous met  
**- Open teen**  
Met de Dressbuddy®  
en slip rond




## Aantrekken



Leg de slip op de knie en laat de Cliënt de voet hierop leggen.



Vouw de slip over de tenen.

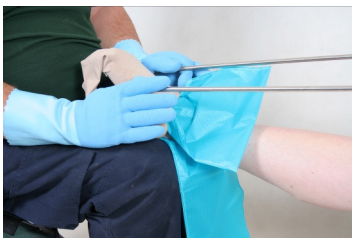

Geef de Cliënt de DressBuddy® vast. Trek de kous over de tenen.



Laat de cliënt zelf aan de beugel trekken en help even bij de hiel.



Help indien nodig door te wrijven met een handschoen aan de kous over de hiel.



Maak de balletjes los van de kous.



Pak nu de slip bij de teen opening vast



Trek de slip aan de buitenste laag de kous uit.



Trek nu de slip die nog in de kous zit er voorzichtig uit de kous.



Sla de kous over de slip en trek de kous naar beneden.



Trek de kous verder naar beneden.



Trek de kous uit.

**Let op trek alleen aan de kous.**

## Uittrekken



Sla de slip om het onderbeen



Haal de slip door de lus. En trek hem aan. Zorg ervoor dat hij onder de enkel door gaat.

Gebruik indien nog nodig handschoenen met hoge weerstand. Hiermee kunt u de plooiën uit de kous wrijven.



Handschoenen  
**Elliezo**  
Katoenen binnenkant



Handschoenen  
**Sigvaris**  
Rubberen binnenkant.