

# elliezo

Postadres:  
Postbus 17  
5170 AA Kaatsheuvel

Bezoekadres:  
Gasthuisstraat 122  
5171 GJ Kaatsheuvel

Tel.: 0416 - 283 571  
Fax: 084 - 756 88 70

Email: info@elliezo.nl  
www.elliezo.com

 **ERITEK BV**  
INTERNATIONAL

Alle producten kunnen op maat gemaakt worden.

Alle hulpmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Deze folder is gemaakt voor uw leverancier door:



1  
Geschikt voor open en gesloten teen.  
Slip voet.



2  
Geschikt voor open en gesloten teen.  
Slip rond.



3  
Aan en uit trekken met 1 hulpmiddel.  
Slip open teen.



4  
Ook als u niet bij uw voeten kunt, is er het juiste hulpmiddel.  
DressBuddy® on/off.




5  
Ook met weinig kracht in de handen kunt u uw TEK zelfstandig aan en uit doen. Been of arm kous.  
DressBuddy® staand.



6  
Lukt het met ander hulpmiddelen niet om uw TEK uit te trekken. Dan is het voor de Ort-O-Mate geen probleem.

## Dressbuddy® on/off voor het aantrekken van elastische kousen met open teen

Met de Slip open teen.

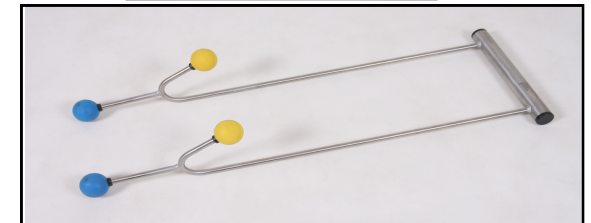

Begin instructie

- Haal de uittrek-slide uit de verpakking en leg deze binnen bereik op tafel.
- Haal de Dressbuddy® uit de verpakking en leg deze binnen bereik op tafel.
- Neem een stevige stoel en zet deze langs de tafel waar de aantrek hulpmiddelen op liggen. De voet moet plat op de grond kunnen staan.
- Haal de blauwe mat uit de verpakking en leg deze voor u op de grond.
- Volg nu de stappen 1 t/m 14.
- **CE- ISP Krabbendijke**


Hygiëne:

- De mat is afwasbaar onder de kraan.
- Uw hulpmiddel kunt u op 30°C wassen.


**Let op:** Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van ander gebruik van de hulpmiddelen als bedoeld in de handleiding!

Materiaalkleuren kunnen afwijken.


## Aantrekken

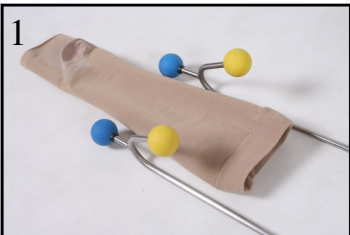

1 Leg de kous met de **hiel naar boven** in het verlengde van de Dressbuddy® op tafel.

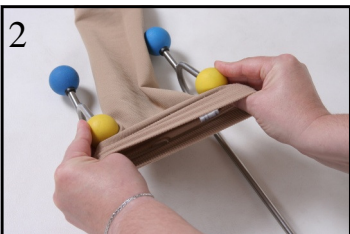

2 Zet de kous op de balletjes van de Dressbuddy®.

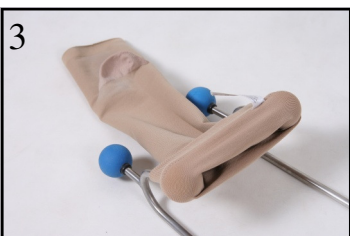

3 De kous zit met de bovenrand omgeslagen op de balletjes van de Dressbuddy®.



4 Steek uw voet in de slof over de hak.



5 Zet de DressBuddy® Op het matje. Stap nu in de kous. Duw de voet verder in de kous voorbij de hiel. (lukt dit niet probeer dan de **TIP**).



6 **Tip** Til de voet op. Draai de Dressbuddy® een kwart slag en duw een balletje over de hiel en draai weer terug.




7 Trek de kous omhoog. Stop met trekken als de bovenkant van de kous ter hoogte van de kuit komt.



8 Haal nu met de hand de balletjes van de Dressbuddy® uit de kous.



9 Duw de hiel van de kous op zijn plaats. Gebruik de stroefheid van de mat.

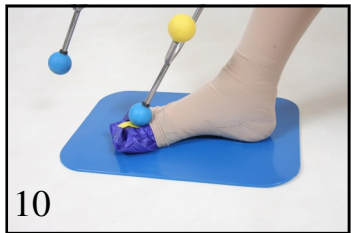

10 Duw met de Dress-Buddy® de slip bij de teen uit de kous.



11 Haal het gele balletje door de lus van de slip en trek zo de slip uit de kous.



12 Duw de kous nu goed. Gebruik desgewenst handschoenen.

## Uittrekken



1 Vouw de slip in zijn geheel open. Steek uw voet in de opening. Maak het klittebandje vast om uw kuit



2 Sla uw kous 10cm. om naar beneden. Sla de kous om de blauwe balletjes.



3 Duw de kous uit over de slip heen. En duw de kous tot voorbij de hiel



4 Duw de kous nu verder uit.



5 Trek de voet uit de kous.