

# elliezo

Elliezo b.v.  
Antwoordnummer 14008  
5140 VG Kaatsheuvel

Postzegel  
niet  
nodig

 **ERITEK BV**  
INTERNATIONAL

Alle hulpmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Deze folder is gemaakt voor uw leverancier door:



Geschikt voor open en gesloten teen.  
Slip voet.



Geschikt voor open en gesloten teen.  
Slip rond.



Aan en uit trekken met 1 hulpmiddel.  
Slip open teen.



Ook als u niet bij uw voeten kunt, is er het juiste hulpmiddel.  
DressBuddy® on/off.



Ook met weinig kracht in de handen kunt u uw TEK zelfstandig aan en uit doen. Been of arm kous.  
DressBuddy® staand.



Lukt het met ander hulpmiddelen niet om uw TEK uit te trekken. Dan is het voor de Ort-O-Mate geen probleem.

## Slip Voet voor het aan- en uittrekken van Therapeutische Elastische Kousen met open teen en gesloten Teen



Voordelen op een rij voor de slip open teen

- Één hulpmiddel om uw kous aan- en uit te trekken!
- Eenvoudig in gebruik!
- Duurzaam en stevig.
- Wasbaar op 30°.
- **CE- ISP** Krabbendijke

Begin instructie

- Haal het hulpmiddel uit de verpakking en leg deze binnen bereik op tafel.
- Volg nu de stappen op de foto's.

**Let op:**

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van ander gebruik van het hulpmiddel als bedoeld in de handleiding!

Materiaalkleuren kunnen afwijken!

Alle producten kunnen op maat gemaakt worden.



## Aantrekken

1 Steek u voet in de punt van de slip.



2 Trek nu uw kous over de voet aan.



3 Trek uw kous helemaal aan over uw been.



4 Pak nu de buitenste slip vast.



5 Trek de buitenste slip uit de kous  
Verdeel de kous nu verder over uw been.

TIP: Handschoenen



## Uittrekken

1 Sla de slip om het onderbeen.



2 Haal de slip door de lus. En trek hem aan. Zorg ervoor dat hij onder de enkel door gaat.



3 Sla de kous over de slip en trek de kous naar beneden.



4 Zorg dat de slip in de kous blijft zitten bij de hiel tot de de kous er helemaal voorbij is.



5 Trek de kous uit.

**Let op trek alleen aan de kous.**

Ik wil graag de volgende artikelen bestellen.

- .....Slip open teen maat **S/M/L/XL**
- .....Slip voet
- .....Slip rond
- .....Slip special voor open en gesloten teen
- .....Slip armkous

Uw gegevens:

Naam:.....

Adres:.....

Postcode:.....

Woonplaats:.....

E-mailadres:.....

Telefoonnummer:.....

Indien u meer informatie zoekt kunt u ook terecht op onze web-site: [www.elliezo.com](http://www.elliezo.com). Daar vindt u uitgebreide productinformatie en instructies.

Wilt u meer informatie over één van onze producten of wilt u één van onze producten bestellen dan kunt u de onderstaande kaart invullen en kosteloos verzenden naar ons antwoordnummer.